

BS歯科用X線フィルム タイプS

ISO感度F 高速明室処理対応X線フィルムパッケージット



- ・ ISO感度Fの高速X線フィルムを使用した口内法撮影用パッケージットです。
 - ・ 現像45秒に加え、洗浄、乾燥の短時間で処理が可能です。
 - ・ 明室、常温*で撮影から現像までの処理が可能です。
- * 常温（22～25℃）が推奨されますが、厳密な管理は不要です。

製品番号：BS-DENT-MSY-SF

医療機器届出番号:13B2X10446000301



プロセス

1. X線フィルム内蔵のパケットを、口内法撮影補助具に装着し、患者の歯越しにX線を露光します。
2. 現像液*をシリンジでパケットに注入します。
3. 約45秒間パケットを揉んで現像液を行き渡らせます。
4. パケットを引き割きフィルムを取り出します。
5. フィルムを2分間流水で水洗後、自然乾燥します。

* 市販の汎用品で処理が可能です。



撮影画像例



仕様

項目	タイプS
増感スクリーン	ノンスクリーン
X線管電流	0.5~1.5 mA
ISO感度	F
サイズ	30×40 mm
入数	100 枚/箱



※製品の色が本カタログの画像と異なる場合がありますが、品質・性能に問題はありません。

お問合せ：

発
売
元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>